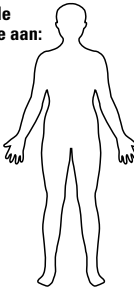


geen  
postzegel  
nodig

BAP Medical B.V.  
Antwoordnummer 1123  
7300 VB APELDOORN

IN TE VULLEN DOOR DE BEHANDELEND ARTS/VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

<b>Type behandeling</b>		<b>Zorgplan</b>
<input type="radio"/> Hypertrofisch litteken <input type="radio"/> Keloïd litteken <input type="radio"/> Te verwachten hypertrofisch/keloïd litteken n.a.v een trauma, wond, ingreep of ongeval <input type="radio"/> Diversen:		
<b>Verstrekking</b>		<b>Geef de locatie aan:</b> 
Eerste verstrekking d.d. : Tweede verstrekking d.d.:		
<b>Beoordeling t.b.v. de vergoeding</b>		<b>Lengte litteken:</b> ..... cm
Is de beoordeling van het litteken gedaan door de arts of verpleegkundig specialist? <input type="radio"/> JA		
Is er sprake van een ernstige aandoening waarbij verpleegkundig specialist of arts behandelaar blijft? <input type="radio"/> JA		
Is er sprake van gecompliceerde littekenzorg met een behandelduur van langer dan 14 tot 21dagen? <input type="radio"/> JA		<b>Geschatte behandelduur:</b> <input type="radio"/> 6 maanden <input type="radio"/> 6 - 12 maanden <input type="radio"/> > 12 maanden
<b>Behandeladvies</b>		
<input type="radio"/> Dagelijks het siliconenverband dragen conform gebruiksaanwijzing <input type="radio"/> Tweemaal daags siliconengel aanbrengen conform gebruiksaanwijzing <input type="radio"/> Anders namelijk:		
<b>Gegevens arts/ verpleegkundig specialist</b>		
NAAM ARTS / VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST		SPECIALISME
NAAM INSTELLING / VESTIGINGSPLAATS		
Bij het zetten van de handtekening wordt tevens bevestigd dat de patiënt op de hoogte is dat dit formulier wordt doorgezonden naar een derde partij (apotheek, medisch speciaalzaak of BAP Medical B.V.) voor het verwerken, controleren, declareren en verzenden van producten.		
HANDTEKENING ARTS / VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST		HANDTEKENING LEVERANCIER NA LEVERING
DATUM		DATUM

LET OP: Vergeet niet de voorzijde van dit formulier in te vullen

# Scarban®

*Omdat elk litteken zorg nodig heeft!*



WWW.SCARBAN.NL

Deze brochure werd samengesteld met medewerking van de afdeling plastische en reconstructieve heelkunde en het brandwondencentrum van het Universitair Ziekenhuis Gent (België), de afdeling plastische heelkunde en het brandwondencentrum van de Universitaire Ziekenhuizen Gasthuisberg, Leuven (België) en de afdeling chirurgie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (Nederland).




BAP Medical B.V.

Laan van de Maagd 119 Tel. +31 (0)55 355 25 80 www.bap-medical.com  
7324 BT Apeldoorn, Nederland Fax +31 (0)55 355 91 98 info@bap-medical.com

Verantwoordelijke uitgever: BAP Medical B.V., P.O. BOX 531, NL-7300 AM Apeldoorn Nederland / ©BAP Medical 2016 / SB-PNL-003

# Scarban®

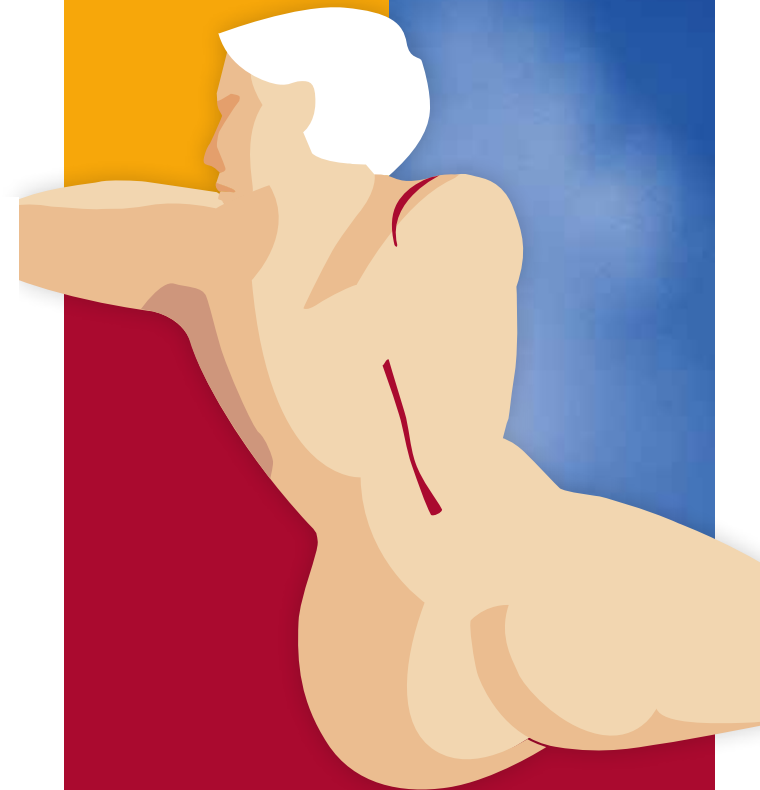


**Omdat élk litteken  
zorg nodig heeft**

Meest geadviseerd door professionals  
Wetenschappelijk onderbouwd

WWW.SCARBAN.NL

## SCARBAN SILICONENVERBAND EN -GEL BIJ (OPKOMENDE) LITTEKENS

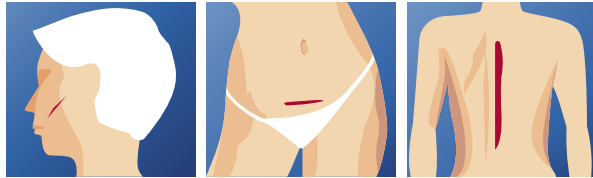

### Littekens ontsieren je huid

Hoe ernstiger de wond, hoe groter de kans op een (groot) litteken. Jij hebt maar één belang: littekens zo veel mogelijk voorkomen of beperken. Scarban medisch siliconenverband en siliconengel zorgen daarvoor.

De werking van siliconen tegen littekens is een *wetenschappelijk onderbouwde therapie*. Daarom is het gebruik van medisch siliconenverband de *voorkeurstherapie* geworden in de professionele littekenzorg.<sup>1,2,3</sup> Ons siliconenverband wordt door professionals in littekenzorg het meest geadviseerd.

### Dat komt onder andere door deze 3 eigenschappen:

- Het verband blijft goed zitten bij het bewegen, ook bij bijvoorbeeld huidplooiën
- Het verband voelt heel zacht en prettig aan dankzij de unieke rekbare stoffen toplaag
- De verbanden bestaan uit 100% medische siliconen met zeer hoge UV-bescherming

### Scarban helpt bij:<sup>4</sup>

- Hypertrofische littekens
- Keloïde littekens
- Voorkomen van littekens

### Literatuurreferenties:

- 1) Monstrey S, et al. Updated Scar Management Practical Guidelines: Non-invasive and invasive measures. *Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery*, 2014.
- 2) Meaume S, et al. Management of scars: updated practical guidelines and use of silicones. *European Journal of Dermatology* 2014.
- 3) Mustoe TA, et al. International Clinical Recommendations on Scar Management. *Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery*, 2002.
- 4) Niessen F, et al. Topical Silicone Sheet Application in the Treatment of Hypertrophic Scars and Keloids. *Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology*, 2016.

## VEELGESTELDE VRAGEN OVER SCARBAN

### Hoe kan ik Scarban-producten bestellen?

Deze folder bevat een receptenformulier. Laat dit invullen door je (huis)arts of verpleegkundig specialist. Je kunt de producten vervolgens bestellen via de apotheek of medische speciaalzaak.

### Worden Scarban-producten vergoed?

Ja. Vanuit de basiszorgverzekering worden alle Scarban-producten in principe vergoed, mits voorgeschreven door een (huis)arts of verpleegkundig specialist. Houd wel rekening met je eigen risico.

### Hoe moet ik de Scarban-producten gebruiken?

Bij ieder Scarban-product zit een uitgebreide gebruiksaanwijzing. Hierin staat alles wat je moet weten over het gebruik van Scarban.

### Kan ik Scarban ook online kopen?

Ja. Scarban is ook verkrijgbaar via [www.scarban.nl](http://www.scarban.nl).

### Hoe moet ik Scarban-verband schoonmaken?

Bij het verband krijg je gratis een speciale cleaning soap geleverd. Daarmee kun je het verband goed reinigen. Douchen is ook een goede gelegenheid om het verband schoon te maken.

### Wanneer kan ik met de Scarban-behandeling beginnen?

Je kunt met Scarban beginnen als de wond volledig gesloten is.

### Werkt Scarban ook op oude littekens?

Ja. Scarban werkt zowel op oude als op recente littekens.

### Duurzaam

Een van de voordelen van Scarban is dat je het verband dagelijks kunt schoonmaken. Het verband is langere tijd te dragen en daardoor duurzaam!

# Scarban® Siliconen littekenbehandeling

## RECEPTFORMULIER & ZN-AANVRAAGFORMULIER

GRATIS THUISBEZORGD? → [DISTRIBUTIE@BAP-MEDICAL.COM](mailto:DISTRIBUTIE@BAP-MEDICAL.COM) OF FAX 055-355 91 98

IN TE VULLEN DOOR DE BEHANDELEND ARTS/VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

NAAM VERZEKERDE		VOORLETTER(S)				
BSN		GEBORTE DATUM				
POLISNUMMER		MAN <input type="radio"/> VROUW <input type="radio"/>				
ZORGVERZEKERAAR						
ADRES						
PLAATS		POSTCODE				
SCARBAN PRODUCT	ZI-NUMMER	INHOUD / FORMAAT	STUKS PER VERP.	AANTAL VERP.		
<b>Scarban Elastic: intensief siliconen littekenverband</b>						
A	B	D	14915626	A 10 x 15 cm	1	
C			14915634	B 15 x 20 cm	1	
			15558460	C 30 x 60 cm	1	
			15047970	D 4 x 3 cm (ovaal)	4	
<b>Scarban Light: onopvallend en dun siliconen littekenverband</b>						
E	F		14915677	E 5 x 7,5 cm	2	
G			14915650	F 5 x 15 cm	2	
			14915669	G 5 x 30 cm	2	
H		I	14915715	H 10 x 15 cm	2	
			14915723	I 15 x 20 cm	2	
<b>Scarban Elastic: plastische chirurgie siliconen littekenverband</b>						
J		K	14915545	J Mamma anker	2 (1 paar)	
			14915537	K Mamma	2 (1 paar)	
L		M	14915596	L Tepel	2 (1 paar)	
			16580710	M Keizersnede	1	
			14915480	N Abdomen	1	
<b>Scarban: hand en vinger siliconen littekenverband</b>						
SUPER ELASTISCH +DRUKVERBAND		R	15048039	O Webspacer 10,5x4 cm	4	
			15047989	P Vingertape 30x2,5 cm	4	
Q		R	15048004	Q Vinger S (5,5 cm)	4	
			15047997	Q Vinger M (6,5 cm)	4	
R		Q	15048012	Q Vinger L (7,5 cm)	4	
			15048020	Q Vinger XL (8,5 cm)	4	
S		R	14915529	R Hand S (18-19 cm)	1	
			14915510	R Hand M (20-21 cm)	1	
T		R	14915502	R Hand L (22-23 cm)	1	
			14915499	R Hand XL (> 24 cm)	1	
<b>Scarban Velvet Touch: siliconen littekgel</b>						
Flacon	15310558	15 ml	1			

LET OP: Vergeet niet de achterzijde van dit formulier in te vullen