

# Casus SCARBAN met ALHYDRAN: Hondenbeet

## 1. Beschrijving casus

leeftijd patiënt	10 jaar
geslacht	jongen
oorzaak	hondenbeet
waarom littekenbehandeling	- geen zicht op littekenverbetering - toename hypertrofie - slechte mobiliteit van de vinger (dig 3 links) - aanhoudende jeuk en roodheid
start littekenbehandeling	3 maanden na beet
therapie	6 maanden intensieve littekenbehandeling: - SCARBAN® Vinger (inclusief drukkous) gedurende de nacht - ALHYDRAN crème (2 à 3 maal daags) gedurende de dag

## 2. Ontwikkeling van het litteken



Open wond

Na 3 maanden:  
start littekenbehandelingLitteken na 3 maanden  
littekenbehandelingLitteken na 6 maanden  
littekenbehandeling

## 3. Conclusies medisch team

Bij de start van de behandeling zag het litteken er slecht uit: reactief en geen zicht op verbetering. Binnen 3 maanden littekenbehandeling al zichtbare verbeteringen.

ALHYDRAN overdag: - Direct een verkoelend effect  
- Gedurende de behandeling werd de jeuk, roodheid minder en de huid soepeler

SCARBAN® Vinger gedurende de nacht: - Litteken werd duidelijk rustiger en soepeler  
- Verbeterde mobiliteit van de hand  
- Minder pijn, jeuk en roodheid

## 4. Ervaring patiënt

Om de jongen van 10 jaar niet te beperken op school en tijdens het spelen, is er gekozen voor een gecombineerde behandeling (ALHYDRAN medische crème + SCARBAN® siliconen littekenbehandeling).

Auteur: Ms. L. Rolfes-van Os, Hand- en Ergotherapeut, Revalidatiecentrum Saxenburg, Hardenberg, Nederland