

Casus SCARBAN and ALHYDRAN: Brandwond

1. Beschrijving casus

| | |
|------------------------------|---|
| Leeftijd patiënt: | 84 jaar |
| Geslacht: | Vrouw |
| Oorzaak: | Trauma na struikelen met een pot hete thee. Patiënte landde op haar knieën en de pot hete thee viel over haar linkerschouder. |
| Waarom litteken behandeling: | Ontwikkeling van een hypertrofisch litteken na diepe tweedegraads brandwonden op de rug van de patiënte. Dit litteken zorgde voor jeuk en pijn bij het bewegen. |
| Start litteken behandeling: | Drieënhalve maand na het trauma. |
| Behandeling: | - SCARBAN en ALHYDRAN gedurende 13 maanden. - Overdag werd 12 uur lang SCARBAN Elastic siliconenverband gebruikt. - 's Avonds werd het verband verwijderd en werd ALHYDRAN aangebracht voor de nacht. - 's Ochtends na het douchen werd het SCARBAN Elastic siliconenverband weer aangebracht. |

2. Ontwikkeling van het litteken



3. Conclusies Medisch Team

- Resultaten boven verwachting.
- Mooie verbetering van de kwaliteit van leven voor de patiënte.
- Kwaliteit van het litteken is duidelijk verbeterd en er is sprake van verbeterde functionaliteit.

4. Ervaring van de patiënte

- Patiënte is zeer tevreden aan het eind van de behandeling.
- Verwisselen van de siliconenverbanden was soms zeer tijdrovend, maar ze wisten waar ze het voor deden.
- Patiënte heeft geen last meer van jeuk of pijn.

Auteur: E. Harink, MSc, verpleegkundig specialist, afdeling Vaatchirurgie, Isala Ziekenhuis Zwolle.