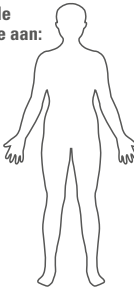


geen  
postzegel  
nodig

BAP Medical B.V.  
Antwoordnummer 1123  
7300 VB APELDOORN

IN TE VULLEN DOOR DE BEHANDELEND ARTS/VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

Type behandeling	Zorgplan
<input type="radio"/> Hypertrofisch litteken <input type="radio"/> Keloïd litteken <input type="radio"/> Te verwachten hypertrofisch/keloïd litteken n.a.v een trauma, wond, ingreep of ongeval <input type="radio"/> Diversen:	Geef de locatie aan:   Lengte litteken: ..... cm
<b>Verstrekking</b> Eerste verstrekking d.d. : Tweede verstrekking d.d.:	
<b>Beoordeling t.b.v. de vergoeding</b> Is de beoordeling van het litteken gedaan door de arts of verpleegkundig specialist? <input type="radio"/> JA Is er sprake van een ernstige aandoening waarbij verpleegkundig specialist of arts behandelaar blijft? <input type="radio"/> JA Is er sprake van gecompliceerde littekenzorg met een behandelduur van langer dan 14 tot 21dagen? <input type="radio"/> JA	<b>Geschatte behandelduur:</b> <input type="radio"/> 6 maanden <input type="radio"/> 6 - 12 maanden <input type="radio"/> > 12 maanden
<b>Behandeladvies</b> <input type="radio"/> Dagelijks het siliconenverband dragen conform gebruiksaanwijzing <input type="radio"/> Tweemaal daags siliconengel aanbrengen conform gebruiksaanwijzing <input type="radio"/> Anders namelijk:	
<b>Gegevens arts/ verpleegkundig specialist</b>	
NAAM ARTS / VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST	SPECIALISME
NAAM INSTELLING / VESTIGINGSPLAATS	
Bij het zetten van de handtekening wordt tevens bevestigd dat de patiënt op de hoogte is dat dit formulier wordt doorgezonden naar een derde partij (apotheek, medisch speciaalzaak of BAP Medical B.V.) voor het verwerken, controleren, declareren en verzenden van producten.	
HANDTEKENING ARTS / VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST	HANDTEKENING LEVERANCIER NA LEVERING
DATUM	DATUM

LET OP: Vergeet niet de voorzijde van dit formulier in te vullen

# Scarban®

Professional Scar Treatment

Because every scar needs care!



WWW.SCARBAN.NL

Deze brochure werd samengesteld met medewerking van de afdeling plastische en reconstructieve heelkunde en het brandwondencentrum van het Universitair Ziekenhuis Gent (België), de afdeling plastische heelkunde en het brandwondencentrum van de Universitaire Ziekenhuizen Gasthuisberg, Leuven (België) en de afdeling chirurgie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (Nederland).



BAP Medical B.V.


Laan van Westenek 64  
NL-7336 AZ Apeldoorn

Tel. +31 (0)55 355 25 80  
Fax +31 (0)55 355 91 98

www.bap-medical.com  
info@bap-medical.com

Verantwoordelijke uitgever: BAP Medical B.V., P.O. BOX 531, NL-7300 AM Apeldoorn Nederland. / ©BAP Medical 2021 / SB-PNL-007

# Scarban®

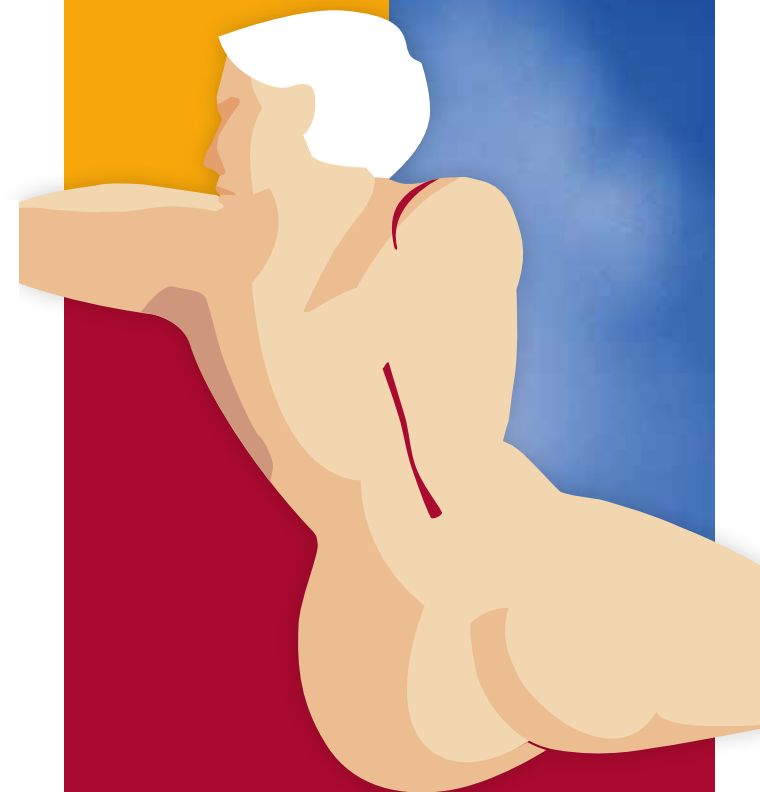

Omdat élk litteken  
zorg nodig heeft

Meest geadviseerd door professionals  
Wetenschappelijk onderbouwd

WWW.SCARBAN.NL

## SCARBAN SILICONENVERBAND EN SILICONENGEL BIJ (OPKOMENDE) LITTEKENS



### Littekens ontsieren je huid

Hoe ernstiger de wond, hoe groter de kans op een (groot) litteken. Jij hebt maar één belang: littekens zo veel mogelijk voorkomen of beperken. Scarban medisch siliconenverband en siliconengel zorgen daarvoor.

De werking van siliconen tegen littekens is een *wetenschappelijk onderbouwde therapie*. Daarom is het gebruik van medisch siliconenverband de *voorkeurstherapie* geworden in de professionele littekenzorg.<sup>1,2,3</sup> Ons siliconenverband wordt door professionals in littekenzorg het meest geadviseerd.

### Dat komt onder andere door deze 3 eigenschappen:

- Het verband blijft goed zitten bij het bewegen, ook bij bijvoorbeeld huidplooiën
- Het verband voelt heel zacht en prettig aan dankzij de unieke rekbare stoffen toplaag
- De verband bestaat uit 100% medische siliconen met zeer hoge UV-bescherming

### Scarban helpt bij:<sup>4</sup>

- Hypertrofische littekens
- Keloïde littekens
- Voorkomen van afwijkende littekens

#### Literatuurreferenties:

- 1) Monstrey S, et al. Updated Scar Management Practical Guidelines: Non-invasive and invasive measures. *Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery*, 2014.
- 2) Meaume S, et al. Management of scars: updated practical guidelines and use of silicones. *European Journal of Dermatology* 2014.
- 3) Mustoe TA, et al. International Clinical Recommendations on Scar Management. *Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery*, 2002.
- 4) Niessen F, et al. Topical Silicone Sheet Application in the Treatment of Hypertrophic Scars and Keloids. *Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology*, 2016.

## VEELGESTELDE VRAGEN OVER SCARBAN

### Hoe kan ik Scarban producten bestellen?

Deze folder bevat een receptenformulier. Laat dit invullen door je (huis)arts of verpleegkundig specialist. Je kunt de producten vervolgens bestellen via de apotheek of medische speciaalzaak.

### Worden Scarban producten vergoed?

Ja. Vanuit de basiszorgverzekering worden alle Scarban producten in principe vergoed, mits voorgeschreven door een (huis)arts of verpleegkundig specialist. Houd wel rekening met je eigen risico.

### Hoe moet ik de Scarban producten gebruiken?

Bij ieder Scarban product zit een uitgebreide gebruiksaanwijzing. Hierin staat alles wat je moet weten over het gebruik van Scarban.

### Kan ik Scarban ook online kopen?

Ja. Scarban is ook verkrijgbaar via [www.scarban.nl](http://www.scarban.nl).

### Hoe moet ik Scarban siliconenverband schoonmaken?

Bij het verband krijg je gratis een speciale cleaning soap geleverd. Daarmee kun je het verband goed reinigen. Douchen is ook een goede gelegenheid om het verband schoon te maken.

### Wanneer kan ik met de Scarban behandeling beginnen?

Je kunt met Scarban beginnen als de wond volledig gesloten is.

### Werkt Scarban ook op oude littekens?

Ja. Scarban werkt zowel op oude als op recente littekens.

### Duurzaam

Een van de voordelen van Scarban is dat je het verband dagelijks kunt schoonmaken. Het verband is langere tijd te dragen en daardoor duurzaam!

## Scarban® SILICONEN LITTEKENBEHANDELING

### RECEPTFORMULIER & ZN-AANVRAAGFORMULIER

GRATIS THUISBEZORGD? → DISTRIBUTIE@BAP-MEDICAL.COM OF FAX 055-355 91 98

IN TE VULLEN DOOR DE BEHANDELEND ARTS/VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

NAAM VERZEKERDE	VOORLETTER(S)		
BSN	GEBORTE DATUM		
POLISNUMMER	MAN <input type="radio"/> VROUW <input type="radio"/>		
ZORGVERZEKERAAR			
ADRES			
PLAATS	POSTCODE		
E-MAIL			
LEVERING PRODUCT(EN)	THUISADRES <input type="radio"/>	ZORGINSTELLING <input type="radio"/>	
RECEPT NA 3 MAANDEN HERHALEN*	NIET NODIG <input type="radio"/>	1X <input type="radio"/>	2X <input type="radio"/> 3X <input type="radio"/>
<small>*DIT RECEPT KAN TOT MAXIMAAL 1 JAAR NA DE RECEPTDATUM HERHAALD WORDEN. HERHALING VAN HET RECEPT GAAT IN OVERLEG MET DE APOTHEEK OF MEDISCHE SPECIAALZAAK.</small>			

SCARBAN PRODUCT	ZI-NUMMER	INHOUD / FORMAAT	STUKS PER VERP.	AANTAL VERP.
<b>Scarban Elastic: intensief siliconen littekenverband</b>				
A	14915626	A 10 x 15 cm	1	
B	14915634	B 15 x 20 cm	1	
C	15558460	C 30 x 60 cm	1	
D	15047970	D 4 x 3 cm (ovaal)	4	
<b>Scarban Light: onopvallend en dun siliconen littekenverband</b>				
E	14915677	E 5 x 7,5 cm	2	
F	14915650	F 5 x 15 cm	2	
G	14915669	G 5 x 30 cm	2	
H	14915715	H 10 x 15 cm	2	
I	14915723	I 15 x 20 cm	2	
<b>Scarban Elastic: plastische chirurgie siliconen littekenverband</b>				
J	14915545	J Mamma anker	2 (1 paar)	
K	14915537	K Mamma	2 (1 paar)	
L	14915596	L Tepel	2 (1 paar)	
M	16580710	M Keizersnede	1	
N	14915480	N Abdomen	1	
<b>Scarban: hand en vinger siliconen littekenverband</b>				
O	15048039	O Webspace 10,5x4 cm	4	
P	15047989	P Vingertape 30x2,5 cm	4	
Q	15048004	Q Vinger S (5,5 cm)	4	
R	15047997	R Vinger M (6,5 cm)	4	
S	15048012	S Vinger L (7,5 cm)	4	
T	15048020	T Vinger XL (8,5 cm)	4	
U	14915529	U Hand S (18-19 cm)	1	
V	14915510	V Hand M (20-21 cm)	1	
W	14915502	W Hand L (22-23 cm)	1	
X	14915499	X Hand XL (> 24 cm)	1	
<b>Scarban Velvet Touch: siliconen littekengel</b>				
Flacon	15310558	15 ml	1	

LET OP: Vergeet niet de achterzijde van dit formulier in te vullen

## SOORTEN LITTEKENS

### Normale littekens

Normale littekens zijn niet verdikt en geven geen (fel)rode kleur. Ze kunnen wel jeuken, pijnlijk zijn en/of 'trekken'.




### Hypertrofische littekens

Hypertrofische littekens zijn dik en stug, komen boven de huid uit en zijn felrood gekleurd. Vaak jeuken ze en doen ze pijn. Ze worden veroorzaakt door ongelukken, brand- en operatiewonden.



### Keloïde littekens

Keloïde littekens groeien groter dan de oorspronkelijke wond. Ze 'woekeren' en geven dezelfde klachten als hypertrofische littekens. Ook keloïde littekens worden o.a. veroorzaakt door ongelukken, brand- en operatiewonden.

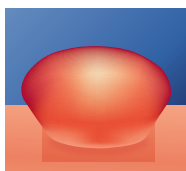

## BEHANDELING VAN LITTEKENS MET SCARBAN

De effecten van Scarban producten merk je snel:

- Klachten als jeuk en pijn worden binnen enkele dagen verlicht of verdwijnen.
- Zichtbare resultaten zie je tussen de 2 tot 4 maanden: je litteken wordt soepeler, vlakker en minder rood.
- De littekenvorming wordt teruggedrongen/geminimaliseerd.

Voor de behandeling van littekens geldt:

*vroegtijdig beginnen voorkomt afwijkende littekenvorming!*

### **Samenwerking**

*Scarban is ontwikkeld in samenwerking met diverse universitaire ziekenhuizen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.*

## DE SCARBAN PRODUCTLIJN

We geven hieronder een overzicht van de verschillende Scarban producten. Ze zijn verkrijgbaar via apotheek, medische speciaalzaak of via [www.scarban.nl](http://www.scarban.nl).

### Scarban Elastic siliconenverband

- Intensieve therapie – hoge werking
- Geschikt voor kleine en grote huidoppervlaktes
- Inclusief zeer hoge UV-bescherming
- Zelf op maat te knippen
- Inclusief speciale cleaning soap



Scarban Elastic



Cleaning Soap



Scarban Light

### Scarban Light siliconenverband

- Dunner en flexibeler – ideaal op beweeglijke plaatsen, zoals elleboog of knie
- Ideaal voor de gevoelige huid
- Inclusief zeer hoge UV-bescherming
- Zelf op maat te knippen
- Inclusief speciale cleaning soap



Alle Scarban siliconenverbanden (Elastic & Light) zijn zelfklevend en wasbaar met de speciaal meegeleverde reinigingslotion. Daarom spreken veel mensen ook van Scarban pleisters. Scarban is ook verkrijgbaar in voorgevormde verbanden voor plastische en esthetisch chirurgie (borst, tepel en buik). Tevens zijn er siliconenverbanden voor handen en vingers.

## Scarban Velvet Touch siliconengel

- Onzichtbare littekentherapie – ideaal voor zichtbare plekken, zoals de hals en het gezicht
- Zeer geschikt voor kleine (chirurgische) littekens
- Snel droog – mogelijkheid om over de gel make-up aan te brengen
- Handige flacon met doserend pompje
- Langdurige werking – slechts twee keer per dag smeren



### **Resultaat**

*Het duurt ongeveer 2 tot 4 maanden voordat je verschil ziet bij je litteken. Je kunt doorgaan met de behandeling totdat het maximale resultaat behaald is.*

## Hoge zonnebescherming

Scarban siliconenverband (zowel Elastic als Light) beschermen je litteken ook tegen de zon. En dat is cruciaal bij een litteken óf bij de nazorg van een brandwond. Zelfs wanneer de zon niet schijnt, zijn de UV-stralen krachtig genoeg om makkelijk je huid binnen te dringen en schade toe te brengen.

Je loopt meer risico op:

- droge huid
- permanente verkleuring
- littekenvorming
- huidkanker

De bescherming van Scarban siliconenverband staat gelijk aan SPF-factor 50. Dit betekent niet dat je onbepert kunt zonnen met je littekenhuid. Het advies is en blijft te allen tijde:

*vermijdt de zon zo veel mogelijk!*

### **Vergoeding**

*Alle Scarban producten worden in principe op voorschrift vergoed vanuit de basiszorgverzekering.*

## DE RESULTATEN BIJ EEN SCARBAN BEHANDELING

Met Scarban kan in principe elk litteken (ongeacht oorzaak, plaats of afmeting) worden behandeld. Hieronder enkele resultaten.

### Brandwond voet

- Patiënt: man
- Leeftijd: 35 jaar
- Na (auto)ongeval



*Open wond*



*Start Scarban*

### Behandeling:

Na wondsluiting  
Scarban siliconenverband  
+ drukverband



*Na 3 maanden*



*Na 11 maanden*

### Brandwond hand

- Patiënt: vrouw
- Leeftijd: 30 jaar
- Ongeval: strijkpers



*Open wond*



*Start Scarban*

### Behandeling:

Na wondsluiting  
Scarban siliconenverband  
+ drukverband



*Na 2 maanden*

### Snijwond gezicht

- Patiënt: vrouw
- Leeftijd: 45 jaar
- Na (auto)ongeval

### Behandeling:

Scarban siliconenverband



*Start behandeling*



*Na 3 maanden*